

Kurzanleitung – COVID-19 Antigen Speichel Test

1. Speichelauffangbehälter und Extraktionsröhrchen zusammenstecken




2. Röhrchen zusammendrücken, Auswurf und Speichel in den Auffangbehälter spucken




- Röhrchen nicht mehr zusammendrücken damit die Flüssigkeit eingesaugt wird
- Wiederholen, bis die Menge (0,5ml) die **erste Markierung** im Röhrchen erreicht
- Falls zu viel Speichel, mit Pipette reduzieren bis zur ersten Markierung

3. Puffer öffnen, gesamter Inhalt in das Extraktionsröhrchen geben

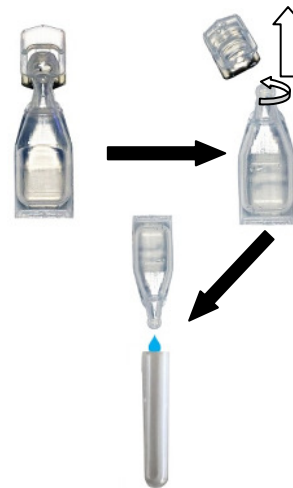

4. Tropfkappe auf Röhrchen setzen und 10 Sek. zusammendrücken

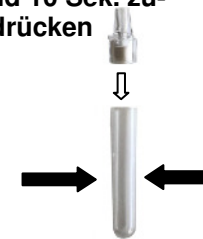

5. 2 Tropfen auf die Kassette geben




6. Nach 15 Minuten ablesen



- **Nicht länger als 20 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

7. Testergebnis ablesen

COVID-19 positiv:

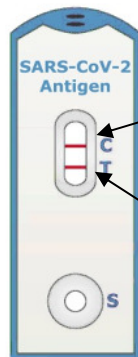


Kontrolllinie (C) bestätigt korrekten Ablauf des Tests
Testlinie SARS-CoV-2 (T)

Zwei farbige Linien (T+C) erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann Schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie.


COVID-19 negativ:

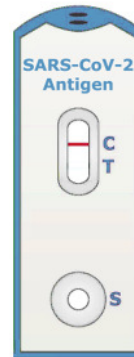

Eine farbige Linie (C) erscheint im Sichtfenster

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 15-20 Minuten ablesen!

Ungültiges Testergebnis:

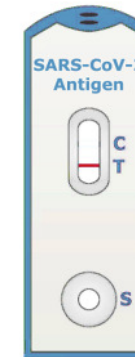

Keine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung!