

# Kurzanleitung – Mononukleose Test

Entweder:

**A. Serum oder Plasma bzw. Kontrollen**

**1 Tropfen** Serum/ Plasma oder Kontrollflüssigkeit  
**1 Tropfen** Puffer

**B. Vollblut venöses**

**2 Tropfen** Vollblut aus der Vene  
**1 Tropfen** Puffer

**C. Vollblut kapillares aus der Fingerkuppe**

**50µl** Vollblut aus der Fingerkuppe  
**1 Tropfen** Puffer


2. 5 Minuten warten



- **Nicht länger als 10 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

## 3. Testergebnis ablesen

**Mononukleose Test positiv:**

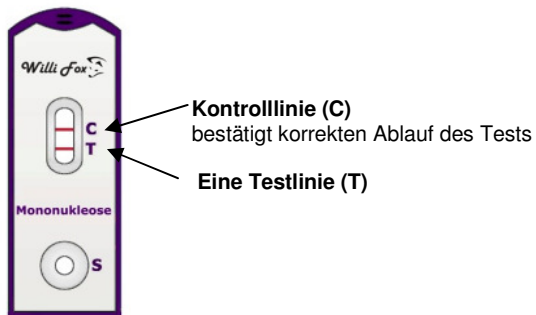

**Zwei rote Linien** erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

**Mononukleose Test negativ:**



**Nur eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 5 bis 10 Minuten ablesen!

**Ungültiges Testergebnis:**



**Keine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!