

Kurzanleitung – Influenza A+B Test

1. Nasenabstrich machen



- Führen Sie den Abstrichtupfer vorsichtig in das Nasenloch ein, welches am meisten Sekret absondert, bis Sie den Widerstand der Nasenmuschel spüren (Nicht mehr als 2,5 cm).
- Drehen Sie den Tupfer ein paar Mal gegen die Nasenwand.

2. Geben Sie 8 Tropfen Puffer in das Extraktionsröhrchen



3. Probe in Flüssigkeit lösen



- Abstrichtupfer in das Extraktionsröhrchen schieben und gegen die innere Wand ausdrücken.
- Nochmals vollsaugen lassen und erneut ausdrücken. Mehrere Male wiederholen.

4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben.

- Kappe auf das Extraktionsröhrchen drücken.



- **3 Tropfen Extraktionslösung** in die Probeöffnung der Testkassette geben.


5. 10-15 Minuten warten



- Bei hoher Virenzahl haben Sie **schon nach weniger als 10 Minute ein Ergebnis**.
- **Nicht länger als 25 Minuten** mit Ergebnis ablesen warten!!

6. Testergebnis ablesen

Influenza A positiv:

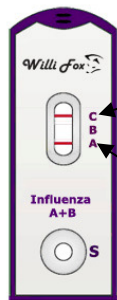

Kontrolllinie (C) bestätigt korrekten Ablauf des Tests

Testlinie Influenza A(A)

Zwei rote Linien (A+C) erscheinen im Sichtfenster

Influenza B positiv:



Zwei rote Linien (B+C) erscheinen im Sichtfenster

Influenza A und B positiv:



Drei rote Linien (A+B+C) erscheinen im Sichtfenster

Influenza A und B negativ:



Eine rote Linie (C) erscheint im Sichtfenster

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Eine gleichzeitige Infektion mit Influenza A und B ist sehr selten. Eine klinische Probe, welche sowohl für Influenza A als auch für Influenza B positive Ergebnisse liefert, **sollte als ungültiges Ergebnis betrachtet werden!**

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!