
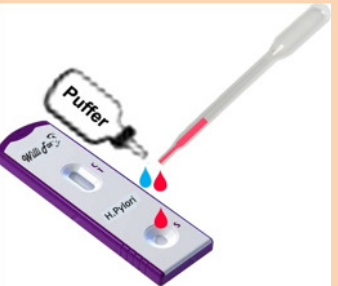
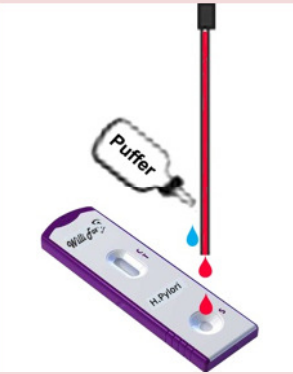



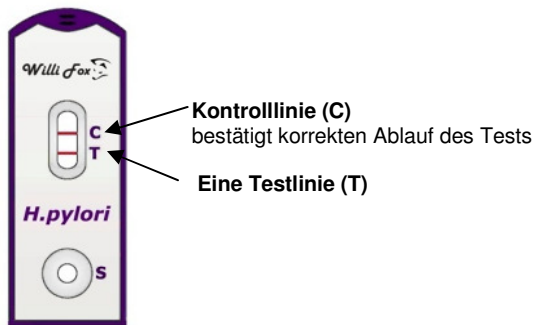
# Kurzanleitung – *Helicobacter pylori* Test

Entweder:

<p><b>A. Serum oder Plasma</b></p>  <p><b>3 Tropfen</b> Serum oder Plasma</p>	<p><b>B. Venöses Vollblut</b></p>  <p><b>2 Tropfen</b> Vollblut aus der Vene <b>1 Tropfen</b> Puffer</p>	<p><b>C. Kapillares Vollblut aus der Fingerkuppe</b></p>  <p><b>50µl</b> Vollblut aus der Fingerkuppe <b>1 Tropfen</b> Puffer</p>	<p><b>2. 10 Minuten warten</b></p>  <p>• <b>Nicht länger als 20 Minuten</b> mit Ergebnis ablesen warten!!</p>
--	--	--	--

## 3. Testergebnis ablesen

***H. pylori* Test positiv:**



**Zwei rote Linien** erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

***H. pylori* Test negativ:**



**Nur eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 10 bis 20 Minuten ablesen!

**Ungültiges Testergebnis:**



**Keine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!