
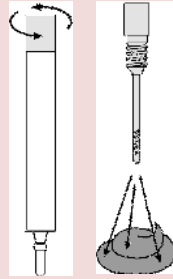


# Kurzanleitung – *Helicobacter pylori* Stuhltest


Vom Patienten durchzuführen:

## 1. Probe auffangen 2. Probe sammeln

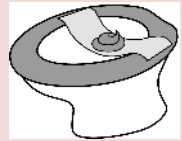

- Probesammelröhrchen aufschrauben und mit der Spitze Stuhl sammeln.
- An **3 unterschiedlichen Stellen** in den Stuhl stossen.


## 3. Spitze in das Röhrchen stossen und verschrauben

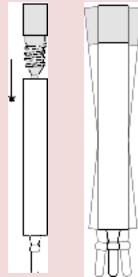

- Probesammelröhrchen in der Tüte verschliessen.
- Achtung: Ungekühlt **innerhalb 6 Stunden** beim Arzt abgeben!  
Im Kühlschrank spätestens nach 3 Tagen

## 4. Probeflüssigkeit auf die Kassette geben. 5. 10 Minuten warten

- Nehmen Sie ein Papiertuch und brechen Sie die Verschlussspitze des Probensammelröhrchens vorsichtig mit einer drehenden Bewegung ab.

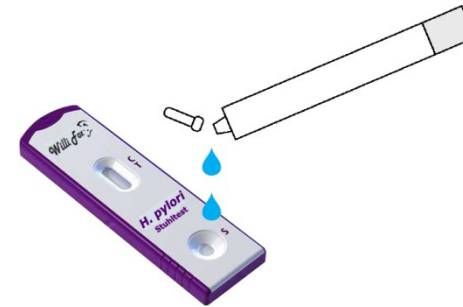


- **2 Tropfen** Probeflüssigkeit in die Probeöffnung der Testkassette geben.

- **Nicht länger als 20 Minuten** mit Ergebnis ablesenwarten!!

## 6. Testergebnis ablesen

### *H. pylori* Test positiv:

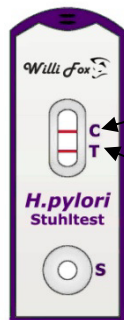

- **Kontrolllinie (C)** bestätigt korrekten Ablauf des Tests
- **Eine Testlinie (T)**

**Zwei rote Linien** erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

### *H. pylori* Test negativ:



**Nur eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Innerhalb der Auswertungszeit von 10 bis 20 Minuten ablesen!

### Ungültiges Testergebnis:



**Keine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!