


Kurzanleitung – LH- Ovulationstest

1. Urin sammeln



- Idealerweise Urinprobe um ca. 12h Mittags nehmen
- Wenn möglich Flüssigkeitszunahme 2 Stunden vorher reduzieren

2. Drei Tropfen Urin ins Probefeld der waagrecht liegenden Testkassette geben

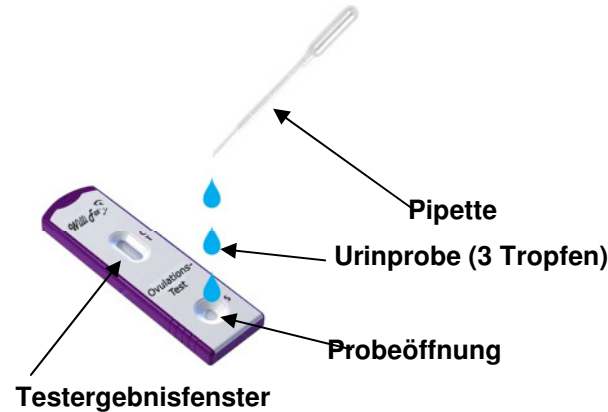

3. 5 Minuten warten



Achtung: Auf keinen Fall länger als 10 Minuten warten mit dem Ablesen!

4. Testergebnis ablesen

Ein Eisprung ist wahrscheinlich (positiv):



Kontrolllinie (C) bestätigt den korrekten Ablauf des Tests
Testlinie (T)

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Kein Eisprung steht bevor (negativ):



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C)

Achtung: Nur innerhalb der Auswertungszeit von 5 Minuten Ergebnis abgelesen!


Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C)

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!

Der LH Anstieg:

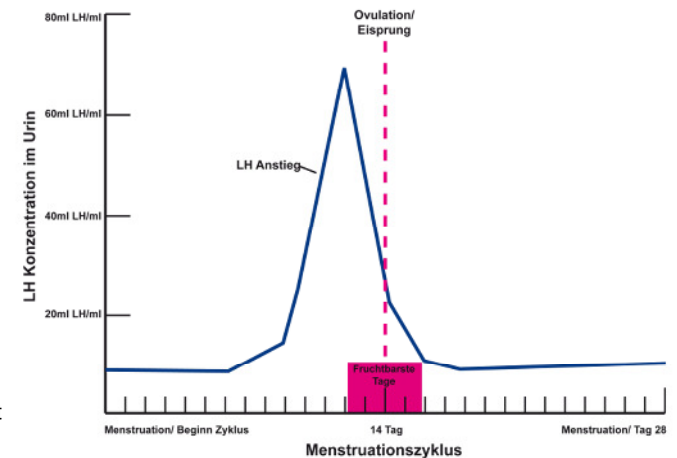

Nachweisgrenze: Untere 5 mIU LH/ml
Kontrolllinie entspricht 35 mIU LH/ml
Sensitivität: 100 % Spezifität: 98.7 %