


Kurzanleitung – Einzeldrogentest

1. Drei Tropfen Urin ins Probefeld der waagrecht liegenden Testkassette geben

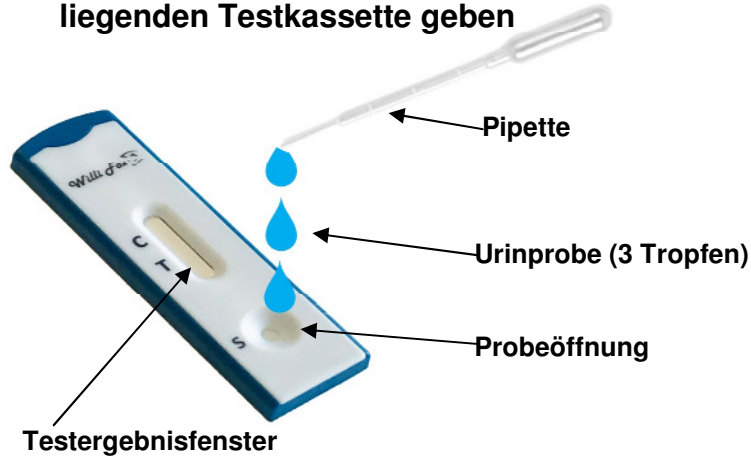


2. 3 - 5 Minuten warten



Achtung: Auf keinen Fall länger als 10 Minuten mit dem Ablesen warten!

3. Testergebnis ablesen

Keine nachweisbaren Drogen (negativ):

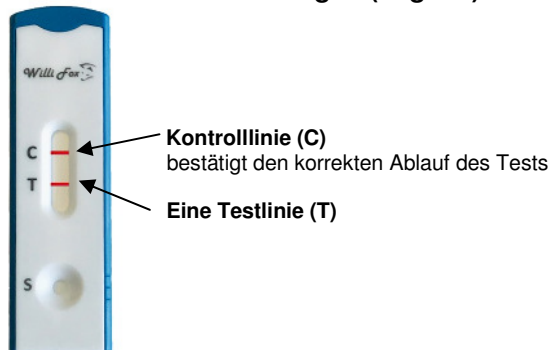

Zwei rote Linien erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Nachweisbare Drogen (positiv):



Nur eine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung der Testlinie muss, wenn sie innerhalb der Auswertungszeit (3 bis 10 Minuten) abgelesen wurde, als negativ interpretiert werden!

Ungültiges Testergebnis:



Keine rote Linie erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!