


# Kurzanleitung – Speichel-Einzeldrogentest

1. 3 Minuten Speichel sammeln bis der Schwamm keine harten Stellen mehr hat.

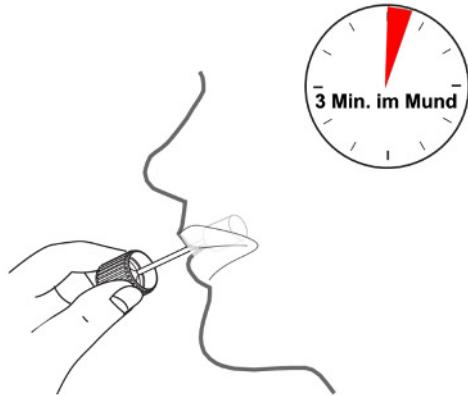

2. Drücken Sie den Speichelnnehmer ganz in den Sammelbehälter und verschliessen Sie ihn.



- Mindestens 0,5 ml Flüssigkeit

3. Blaue Kappe abschrauben und drei Tropfen auf die Kassette geben




4. 10 Minuten warten.



**Achtung:** Auf keinen Fall länger als 20 Minuten warten mit dem Ablesen!

## 5. Testergebnisse ablesen:

Keine nachweisbaren Drogen (negativ):

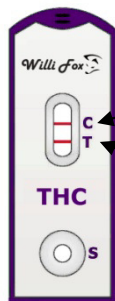

**Kontrolllinie (C)**  
bestätigt den korrekten Ablauf des Tests

**Eine Testlinie (T)**

**Zwei rote Linien** erscheinen im Sichtfenster

Achtung: Die Farbintensität der Testlinie kann schwächer oder stärker sein als die der Kontrolllinie und zwischen rosa und rot variieren.

Nachweisbare Drogen (positiv):



**Nur eine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C):

Achtung: Selbst eine nur leichte rosa Verfärbung der Testlinie muss, wenn sie innerhalb der Auswertungszeit von 10 -20 Minuten abgelesen wurde, als negativ interpretiert werden!

Ungültiges Testergebnis:



**Keine rote Linie** erscheint in der Kontrollregion (C).

Der Test ist ungültig und sollte wiederholt werden!