


Kurzanleitung – Alkohol-Atemtest

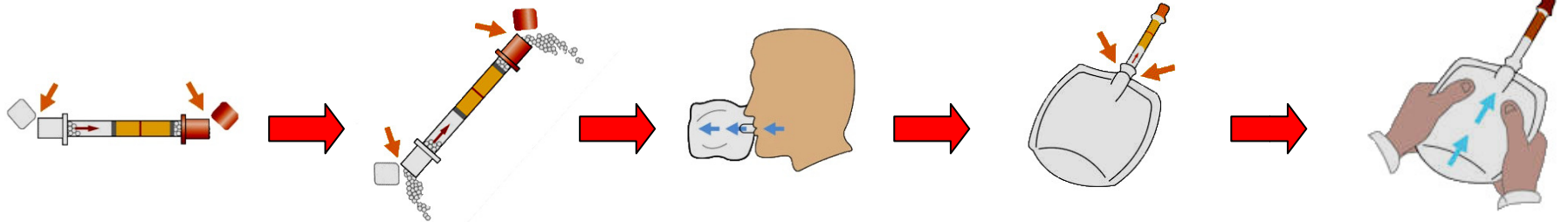

1. Brechen Sie die beiden Kappen an den Enden des Teströhrchens ab.
2. Schütten Sie die ungefährlichen weissen Kristalle (Trockenmittel) in den beiden Enden aus dem Röhrchen in den Müll.
3. Blasen Sie den Beutel mit einem grossen Atemstoss auf.
4. Schieben Sie das **weisse** Ende des Teströhrchens in den Beutelhals.
5. Pressen Sie den Beutel mit beiden Händen langsam und gleichmässig zusammen, sodass die gesammelte Atemluft stetig in ca. **20 Sekunden** durch das Teströhrchen entweicht.

6. Testergebnis ablesen nach 2 Minuten

Kein nachweisbarer Alkohol (negativ):



Keine grüne Verfärbung im Teströhrchen.
Kein Alkohol oder der Alkoholspiegel liegt unter der nachweisbaren Grenze von 0.2‰.

Nachweisbarer Alkohol (positiv), aber unterhalb der Limite von 0.5‰:



Rote Linie

Die grüne Verfärbung im Teströhrchen ist unterhalb der roten Linie.

Nachweisbarer Alkohol (positiv), aber oberhalb der Limite von 0.5‰. > Fahruntüchtig!:



Rote Linie

Die grüne Verfärbung im Teströhrchen geht bis oberhalb der roten Linie.